

Уход и обработка аппарата НИВЛ при использовании на дому

Корпус аппарата

1. Регулярно протирайте аппарат чистой влажной тканью. При необходимости, особенно во время и после болезни, обрабатывайте жидким дезинфицирующим средством (например, 70%-й раствор изопропилового спирта). Следите, чтобы в корпус аппарат не попадали инородные предметы: волосы, насекомые, жидкость и т.д.

Увлажнитель

2. Используйте в увлажнителях дистиллированную воду. Ежедневно меняйте воду в увлажнителе. Использование не дистиллированной воды может привести к образованию известкового камня и выхода увлажнителя из строя.
3. Не перемещайте аппарат с увлажнителем, иначе вода может попасть внутрь корпуса, что приведет к поломке. Если увлажнитель встроен в аппарат, сперва слейте из него воду.
4. Ежедневно промывайте колбу увлажнителя в теплой воде с помощью мягкого моющего средства, полностью просушите.

Маска

5. После каждого использования промывайте маску с мылом под проточной водой или замочите в мыльном растворе примерно на 15-30 минут. Для приготовления раствора используйте жидкое мыло или жидкость для мытья посуды и теплую воду.
6. При необходимости, особенно во время и после болезни, замачивайте маску в дезинфицирующем средстве для замачивания медицинских изделий из силикона и ПВХ.
7. Ежедневно стирайте ремешки от маски руками в слабом мыльном растворе, не растягивая их. Положите на чистое полотенце и полностью просушите.
8. Производите замену маски примерно 1 раз в 6 месяцев, но не реже чем раз в год.

Контур

9. Промывайте контур ежедневно. Для приготовления раствора используйте жидкое мыло или жидкость для мытья посуды и теплую воду. Замочите контур в растворе на 30-60 минут. Хорошо промойте под проточной водой, стряхните, просушите самотёком.
10. При необходимости, особенно во время и после болезни, замачивайте контур дезинфицирующем средстве для замачивания медицинских изделий из силикона и ПВХ.
11. Если после сушки внутри контура осталась влага, можно продуть её воздухом из аппарата.
12. Контур со встроенной системой подогрева и контуры из ПВХ меняйте 1 раз в месяц, контуры из силикона – 1 раз в 6 месяцев.

Фильтры

13. Фильтр грубой очистки (из поролона) промывайте один раз в 10-14 дней в теплой воде с мылом. Оставьте фильтр до полного высыхания на воздухе. Влажный фильтр использовать нельзя! Не используйте аппарат без фильтра! Меняйте фильтр 1 раз в год.
14. Если в аппарате установлен фильтр тонкой очистки, меняйте его 1 раз в месяц.
15. Нерегулярная замена фильтров грубой и тонкой очистки может привести к перегреву и выходу аппарата из строя
16. Если установлен антибактериальный фильтр, меняйте его раз в сутки при ежедневном использовании аппарата.

Техническое обслуживание

17. Проводите техническое обслуживание аппаратов в соответствии с инструкцией и количеством часов наработки. В случае несоблюдения сроков ТО может произойти поломка во время использования аппарата.

Аккумуляторная батарея

18. Если аппарат имеет встроенную аккумуляторную батарею, и вы не используете аппарат регулярно, необходимо осуществлять профилактический заряд АКБ в соответствии с инструкцией к аппарату. При отсутствии профилактической подзарядки АКБ может выйти из строя из-за глубокого разряда.

Дополнительная информация об уходе за оборудованием по ссылкам:

Особенности эксплуатации респираторного оборудования

<https://rutube.ru/video/7216c3e43eaf76dedb536fcb6a2eeb87/?r=wd>

Правила ухода из эксплуатации аппарата НИВЛ

<https://rutube.ru/video/09b1884d7ad884e37a44845f1863e6ed/?r=wd>

Подготовлено фондом “Семьи СМА” при поддержке [фонда Президентских грантов](#)

